

# Aspirasyon Cihazı Kullanım Talimatı

## AMAÇ:

Aspirasyon cihazının yararlı ve güvenli kullanılmasını sağlamaktır.

## KAPSAM:

Aspiratör cihazının amaca uygun işlem yapabilmesi için açılması, kullanılması ve kapatılması ile ilgili işlem basamaklarını; Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimini kapsar.

**UYGULAMA:** Aspiratör cihazını kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapınız.

- ✓ Cihazı hasta başına getiriniz.
- ✓ Kavanoz kapaklarını kontrol ediniz.
- ✓ Elektrik kablosunu topraklı bir prize takınız.
- ✓ Açma kapama anahtarını (0) konumundan (1) konumuna getiriniz.
- ✓ Aspiratör hortumunun ucunu kavanoz kapağı üzerindeki vakum konektörüne takınız.
- ✓ Vakumlama yaptığını kontrol ediniz.
- ✓ Aspirasyon işlemini yapınız.
- ✓ İşlem bittikten sonra hortumu çıkartınız.
- ✓ Cihazı kapatıp, fişi prizden çıkartınız.
- ✓ Kavanozu boşaltıp, hortum temizliğini yapınız.
- ✓ Cihazı sonraki kullanıma hazır durumda bırakınız.