

# EKG Cihazı Kullanım Talimatı

## AMAÇ:

EKG cihazının yararlı ve güvenli kullanılmasını sağlamaktır.


## KAPSAM:

EKG cihazının amaca uygun işlem yapabilmesi için açılması, kullanılması ve kapatılması ile ilgili işlem basamaklarını; Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimini kapsar.

## UYGULAMA:

Aspiratör cihazını kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.
- Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb).
- Elektrotlar aşağıdaki şekilde bağlanır:

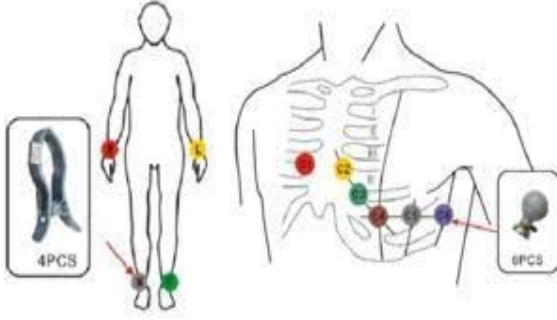

V1: 4. interkostal aralıkta, sternumun sağ kenarına.

V2: 4. interkostal aralıkta, sternumun sol kenarına.

V3: V2 ile V4 arasına.

V4: Midklaviküler hatta 5. interkostal aralığa.

V5: Anteriyor aksiller hatta 5. interkostal aralığa.

V6: Midaksiller hatta 5. interkostal aralığa.

- Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.

- Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.
- İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.
- EKG kabloları dairesel olarak toplanır.
- Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.
- EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.
- Günlük olarak, sarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.