

ETÜV Kullanım Talimatı

AMAÇ:

ETÜV cihazının yararlı ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

KAPSAM:

ETÜV cihazının amaca uygun işlem yapabilmesi için açılması, kullanılması ve kapatılması ile ilgili işlem basamaklarını; Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimini kapsar.

UYGULAMA: ETÜV cihazını kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Cihazın kapağını açınız.
- Steril olacak malzemeleri etüvün içine yerleştiriniz. (Tromel havalandırma deliklerinin açık olduğuna dikkat ediniz. Alet tepsilerinin kapaklarının yarı açık olmasına dikkat ediniz)
- Cihazın kapağını kapatınız. Üstteki soğutma deliğinin kapalı olduğuna dikkat ediniz.
- Cihazın şalterini (On/Off düğmesini) açınız.
- Isı ayar düğmesini 170 C'ye ayarlanmış olarak çalıştırınız. Bu ısıya yükseldikten sonra 60 dakika tutarak süre sonunda şalterini kapatınız.

İdeal Sterilizasyon Değerleri:

- ✓ 170 C'de 60 Dakika
- ✓ 160 C'de 120 Dakika
- Cihazı soğumaya bırakınız. Soğuma sırasında üstteki hava deliğini açınız. Hızlı soğuma için dahi olsa cihazın kapağı hemen açılmamalıdır.
- Tromelleri cihazdan çıkartırken yan kapaklarını kapatınız. Alet tepsilerinin ağızlarını kapalı tutunuz.
- Cihazı kapatıp, fişi prizden çıkartınız.
- Gerekliyse temizliğini yapınız ve cihazı sonraki kullanıma hazır durumda bırakınız.

Sterilizasyonda dikkat edilmesi gerekenler:

- ✓ Etüvün kullanımında sıcaklık ayarı doğru seçilmelidir. Plastik malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanmadığı için etüve konulmamalıdır.
- ✓ Sterilize edilecek malzemenin koyulduğu tromel, alet tepsisi vb üzerine sterilizasyon indikatör bandı yapıştırılıp yeterli ısıya ulaşıldığı takip edilmelidir.
- ✓ Malzeme üzerine sterilizasyon tarihi ve içerik bilgi notu yazılmalıdır.
- ✓ Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır.
- ✓ Farklı cins malzemeler aynı anda etüve konulmamalıdır.
- ✓ Uygulama sonrası sterilize edilen malzemeler kirli malzemeler ile aynı yerde bulundurulmayıp kirli malzeme tepsileri ağızı açık olarak bırakılmalıdır.